

新型コロナウイルス抗体簡易検査キット

COVID-19(新型コロナウイルス)抗体チェックキット

目に見えない脅威へのリスク管理をはじめましょう

SERENITY SAFETY KIT

セレニティ・セーフティ・キット

所要時間約16分の迅速チェックを実現！

価格：4,000 円(税抜)

3点セット

- ① 検出カード
- ② プラスチック試験管 (希釈液入り)
- ③ スポイト



1. 製品概要

本抗体チェックキットは、COVID-19(新型コロナウイルス)専用で、「重症化の可能性の高い感染者の早期発見と施療」を目的としております。

血液中の新型コロナウイルス抗体を迅速にチェックします。血液の添加、希釈液の添加、15分程度の静置の3ステップで簡単に判定が可能です。

【製品概要】



① 検出カード 1個



② プラスチック試験管 (PPチューブ)
希釈液 0.08ml (約2滴) 入り



③ スポイト

※ 本キットにはランセット (採血針) は付属していません。ランセットは医療器具となるため、薬事法上当社では取り扱うことができませんので、お近くの薬局などでご購入下さい。

【特徴例】

- ・現在新型コロナウイルス感染の検査に用いられているPCR法の遺伝子検査と比べて、時間・コスト作業スペースの削減など検査の大幅な効率化。
- ・EUヨーロッパ医療機器CE取得
- ・WHO認定企業製品

2. チェック方法

① 血液サンプルの添加



アルミ箔包装袋からチェック用検出カードを取り出し、ランセット (採血針：別売) を使用し20 μ Lの全血を検出カードの“S”印部のサンプルホールに入れます。

※通常、試験管法においては
1滴量 \approx 50 μ L

② 希釈



約80 μ L (約2滴) の希釈液を検出カードの“S”印部のサンプルホールに入れ、15分時間を計ります。


③ 結果の確認 (読取りウィンドウ)



陽性



陰性

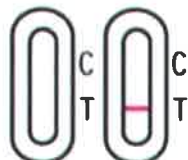

無効

※ 測定結果は、30分後に無効になります。

3. 注意事項

1. 本キットにはランセット (採血針) は付属していません。お近くの薬局などでご購入ください。
2. 本キットは使い捨てのため再利用はしないでください。期限切れの製品は使用しないでください。
3. チェックには新鮮な検体を使用し、凍結融解検体を繰り返し使用しないでください。
4. チェックは室温で行ってください。低温で保管された検出カードは、湿気を避けるため、開封前に室温に戻す必要があります。
5. 明らかな損傷のあるキットや、損傷または期限切れの検出カードを使用しないでください。
6. 不適切な検体の収集または処理は、偽陰性の結果につながる可能性があります。
7. 本キットの結果が陽性か陰性かを問わず、速やかにビニール袋などで封をして廃棄してください。
8. 本キットはCOVID-19 (新型コロナウイルス) を対象としています。他のウイルスのチェックにはお使いにならないでください。
9. 本製品は100%の精度を保証しているものではありません。
10. 検出カードと希釈液は2 $^{\circ}$ C~30 $^{\circ}$ Cで保管し、有効期限は6ヶ月程度です。アルミ箔包装袋から開封後、1時間以内にご使用ください。

<販売代理店>

株式会社サン・グローバル総合研究所

〒400-0858 山梨県甲府市相生 1-7-3

http://www.3gc.co.jp tel:055-233-3130